



Пользуйтесь презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.

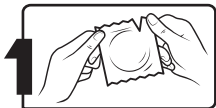

- Проверьте срок годности на упаковке перед использованием. Если срок истек, используйте новый презерватив.
- Используйте презервативы только с не истекшим сроком годности.
- Аккуратно надорвите упаковку со стороны зубчатой кромки. Будьте осторожны – острые предметы могут повредить презерватив.

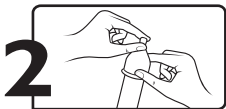

- Надевайте презерватив до начала полового акта и только после наступления эрекции.
- Убедитесь, чтобы презерватив был свернут наружу и легко раскатывался. Если вы испытываете затруднение при раскатывании презерватива, то он вывернут наизнанку.
- Расположите свернутый презерватив на головке полового члена. Нажмите двумя пальцами на резервуар, чтобы удалить из

него воздух. Это поможет избежать разрыва презерватива.



- Наденьте презерватив расправьте по всей длине до самого основания, оставляя резервуар свободным. Расправьте презерватив, если он начнет сворачиваться во время секса. Если презерватив слетает, сразу же замените его на новый.



- После эякуляции, но пока пенис еще возбужден, извлеките его из влагалища. Придерживайте презерватив у кромки, чтобы он не соскользнул.
- Аккуратно снимите презерватив, придерживая его у основания. Не касайтесь презервативом или ленисом влагалища после того, как презерватив снят.
- Сверните использованный презерватив, заверните его в бумажную салфетку и выбросьте в мусорное ведро.
- Пожалуйста, не выбрасывайте презервативы в унитаз.

## Feelmore®

Предлагаем вам современные и надежные высококачественные презервативы торговой марки Feelmore®. Презервативы позволяют полностью отдаться чувствам, оставляя лишнее беспокойство в стороне. При правильном использовании презервативы являются эффективным средством для предохранения от нежелательной беременности и защитой от заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, включая ВИЧ (СПИД). Однако ни один контрацептив не гарантирует 100% защиты. Если вы беспокоитесь о возможном заражении или беременности, немедленно обратитесь к врачу. Данная памятка содержит важную информацию, рекомендуем внимательно ознакомиться с ней перед использованием презервативов.

- Осмотрите фольгированную упаковку презерватива. Если она смята, распечатана или явно повреждена, используйте другую презерватив.
- Каждый презерватив используется только один раз.
- Не применяйте в качестве дополнительной смазки растительные, животные или кулинарные жиры, а так же лосьоны или вазелин.
- Покупайте только те лубриканты,


которые рекомендованы для использования с презервативами.

- При лечении средствами местного применения, если вы не уверены в их воздействии на презерватив, проконсультируйтесь с врачом.
- В случае появления дискомфорта или раздражения, прекратите использование презерватива. Если симптомы сохраняются продолжительное время, обратитесь к врачу.
- Используйте новый презерватив для каждого вида секса.

Осторожно: данное изделие содержит натуральный каучуковый латекс, который может вызвать аллергическую реакцию. Качество презервативов торговой марки Feelmore® гарантировано высоким уровнем контроля качества на всех этапах производства. Проверены электроникой.

Изготовитель: THAI NIPRON RUBBER INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED. Адрес изготовителя: 1 Charoenrat Road, Thungwatdon, Sathon, Bangkok 10120, Thailand.

Уполномоченная организация/импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: 633621, Российская Федерация, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800)200-09-95 [www.feelmore.sex](http://www.feelmore.sex)

  
Obelis S.A. Boulevard Général Wafis 53, 1030 Bruxelles, BELGIUM  
Tel: +(32) 2-732-59-54  
Fax: +(32) 2-732-60-03, e-mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)  
ISO 4074  
EN ISO 13485:2016  
ГОСТ 4645-81  
CE  
РУ № ФСЗ 2011/10114 от 05.12.2019 0123  
Хранить в сухом месте при температуре от 0 до +25°C вдали от прямых солнечных лучей.

